

Carrot 3 XL

176 cm ja 40 - 75 kg asti

Lapset kasvavat ja paino lisääntyy. Niin kuuluukin olla. Carrot 3 XL on kehitetty seuraavaksi vaiheeksi tarjoamaan pidempään kasvaville lapsille turvaistuin, joka kasvaa käyttäjän mukana. Sitä voidaan käyttää noin 176 cm:n pituuteen ja enintään 75 kg:n painoon asti. Se on testattu onnistuneesti 75 kg:n törmäystestinukella.

Jos sinulla on jo Carrot 3, tarvitset vain XL-paketin. Se sisältää:

- tasaisen, leveämmän istuimen
- kaksi pitkää yhdysputkea istuimen ja olemassa olevan selkäosan yhdistämiseen
- H-vyön käyttäjän asennon tukemiseen
- Vyön, jolla Carrot 3 XL kiinnitetään auton istuimen selkänojaan

Jos sinulla ei ole Carrot 3:a, voit käyttää XL-sarjaa kuten isossa kuvassa on esitetty. Se sisältää:


- XL-sarjan edellä kuvatulla tavalla
- Carrot 3 -selkäosan
- suuren niskatuen, joka vaimentaa energiaa sivutörmäyksessä
- hartiasuojamoduulin, joka antaa myös sivutukea ja suojaa
- 50 mm:n selkänojan jatkotyyny (lisäpehmusteilla voidaan täyttää enintään 20 cm)

Lisävarusteet:

- tukipöytä
- selkänojan jatkopehmusteet 50 tai 100 mm
- kolmioalusta



- 2-pisteinen lantiovyö
- ilmatyyny spacer-kankaasta, vähentää hikoilua
- inkontinenssisuojat
- haarakiila
- 3D-vartalotuet vaahtomuovista, tarrakiinnitteiset
- turvavyön solki käyttäjille, jotka avaavat soljen ajon aikana ajattelemattomasti (katso sivun 2 alaosa)
- ISO-Base ISOFIX-kiinnityksellä
- jalkatuen kiinnike sis. ISOFIX-kiinnityksen
- karkaamisen estävä vyö

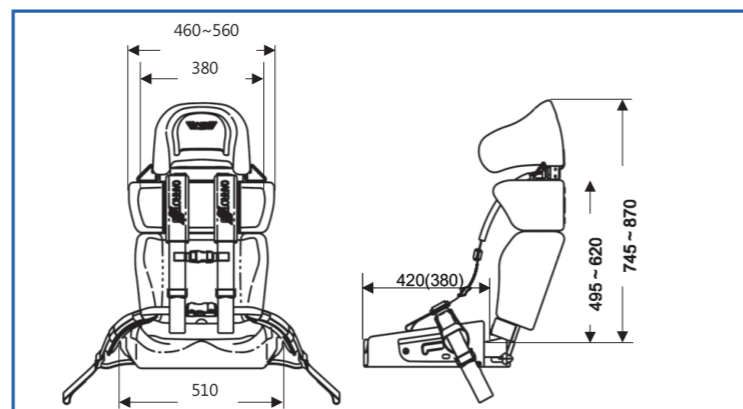

Carrot 3

Turvaistuin lapsille

Carrot 3 -turvaistuin on erittäin mukava istuin lapsille ja nuorille noin kahden vuoden iästä alkaen. Tämän istuimen erityisiä etuja ovat:

Istuinrunko

Istuinrunko tarjoaa monia etuja houkuttelevassa muodossa. Carrot 3 antaa sivuttaistukea lapsille, joilla on heikentynyt lihaskontrolli pään, rintakehän, lantion ja yläreisien alueella. Leveällä rintapehmusteella varustettu 5-pistevyö antaa lisäksi tukea asennon hallintaan. Vartalotuet ja haarakiila voivat tarjota lisätukea. Pieniä harmaita tukipehmusteita voidaan käyttää missä tahansa tässä istuimessa, koska ne voidaan kiinnittää tarrakiinnityksellä istuinpäällisen kaikkiin osiin.

Joustava kasvu lapsen mukana


Pienet lapset voivat lepuuttaa sääriään ja jalkojaan kiinnitetyllä pehmusteella. Tarvittaessa voidaan lisätä korkeussäädettävä jalkatuki lisätukea varten. Lapsen kasvaessa istuinsyvyyttä ja selkänojan korkeutta voidaan kasvattaa huomattavasti aina 160 cm:n käyttäjäpituuteen asti. Tämän jälkeen istuinta voidaan laajentaa Carrot 3 XL -sarjalla, joka mahdollistaa käytön 176 cm:n käyttäjäpituuteen asti (katso sivu 4). Vastaavaa istuinta, joka tarjoaisi näin laajan joustavuuden lapsen kasvun mukana, ei ole.

Kevyt

Carrot 3 painaa vain 8 kg, mikä on etu silloin, kun istuinta siirretään usein autosta toiseen tai pyörälliseen alustaan.

Tyylikäs

Sekään ei ole haitaksi, että Carrot 3 on myös tyylikäs.

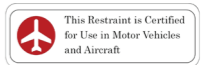

Hyväksytty lentokone käyttöön (Ei koske Carrot 3 XL)

Carrot 3/XL -kokoontuotesimerkkejä



Tiedot

- istuinsyvyys: 250–410 mm
- selkäosan korkeus: 520–770 mm
- jalkatuen korkeus: 250–460 mm
- istuimen paino: noin 8 kg
- lapsen pituus: noin 80–150 cm

Carrot 3 on testattu ja hyväksytty yleiseksi turvalaitteeksi lääkinnällisiä laitteita koskevan lain mukaisesti, eikä siihen sovelleta muita standardeja.

Carrot 3 on lisäksi testattu onnistuneesti ECE R129/03 -määräyksen mukaisesti Q3-testinukella (pieni istuinkokoonpano 80–95 cm pitkille lapsille) ja Q10-testinukella (suuri istuinkokoonpano 95–150 cm pitkille lapsille). Saksassa ja muissa Euroopan maissa vaaditaan lääkärintodistus alle 80 cm ja yli 150 cm pitkille lapsille.

Modulaarinen kasvu




Set S

Hartiasuojamoduuli (150 mm)


Set L

(kuvassa istuimenpidennys S 50 mm)

Mitat (mm):

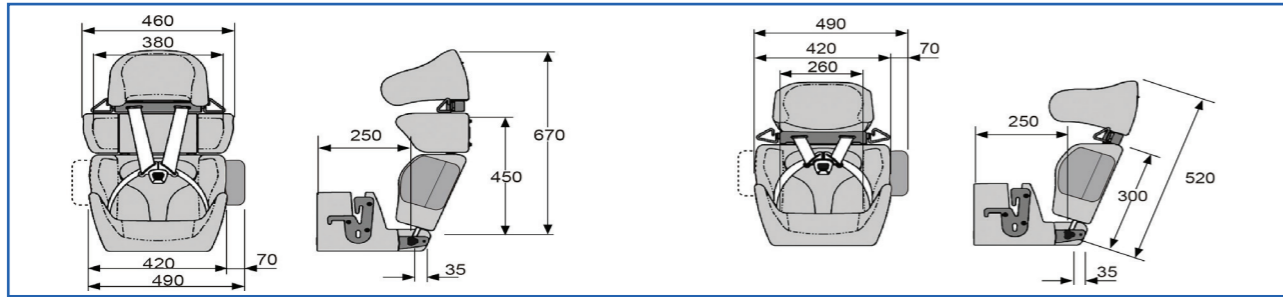

Kasvumoduulit:

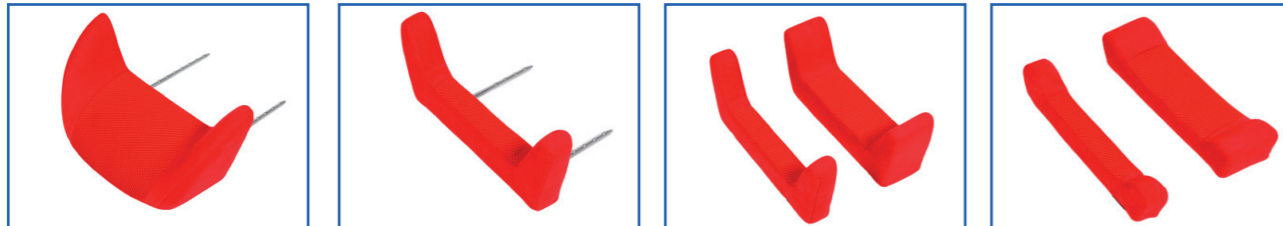

Istuimenpidennys L

Istuimenpidennys S 50 mm

Istuinpidennykset
50 mm ja 100 mm

Selkänojan pidennys
50 mm ja 100 mm

Muita lisävarusteita:



Tukipöytä

Istuinkulman säätömatto

Karkaamisen estävä solki

Jalkatuki S, M, L

Kuvassa vartaloituilla ja
haarakiilalla

Kärryillä

Kun lapsi kasvaa, myös Carrot kasvaa.

Esimerkkejä kokoonpanoista:

Set S ilman hartiasuojamoduulia



istuimenpidennys L
todellinen istuinsyvyys: 430 mm



perussetti harmailla pehmusteilla
todellinen istuinsyvyys: 250 mm



istuimenpidennys S 50mm,
50 mm selkänojan pidennys
todellinen istuinsyvyys: 300 mm



istuimenpidennys S 50mm,
istuimenpidennys 50 mm ja
selkänojan pidennys 100 mm
todellinen istuinsyvyys: 350 mm

Perussetti

- Istuin ja 100 mm korkeussäädettävä selkänoja
- Niskatuen syvyyssäätö
- 5-pistevyö pikairrotussoljella
- Pehmustettu rintasuojus
- Integroidut käsinojat
- Vyönohjain (vasen ja oikea)
- Istuinsyvyyden säätö 35 mm
- Sivutörmäyssuojapehmuste
- Sarja harmaita pehmusteita: niskatuen pehmusteet, yksi pari vartalotukipehmusteita, yksi pari istuimen tasapainopehmusteita ja istuinpehmusteet
- Kaikki pehmusteet kiinnitetään päälliseen tarralla

Värit

sininen / musta / punainen

Lisävarusteet

- istuimenpidennys L
- istuimenpidennys S, 50 mm
- istuinpidennys 50 mm
- istuinpidennys 100 mm
- istuinkulman säätömatto
- jalkatuki, korkeussäädettävä, tarrakiinnikkeet sääriä ja jalkoja varten 250 mm, kolmessa koossa (S, M, L)
- tukipöytä
- sisäpehmuste spacer-kankaasta
- 2-pisteinen lantiovyö
- haarakiila
- vartalotukipehmusteet
- ISO-Base ISOFIX-kiinnityksellä
- ISO-Turn-kääntölevy ISOFIX-kiinnityksellä
- selkänojan pidennys 50 ja 100 mm
- vahvempi solki 40–80 N
- olkavyön vetohihna tarrakiinnityksellä
- kiinnityshihna lentokoneen istuimeen
- karkaamisen estävä liivi

Tyypihyväksyntä

UNECE R129 -standardin mukainen. Testattu onnistuneesti Q3-testinukella 80–95 cm pitkille lapsille ja Q10-testinukella 95–150 cm pitkille lapsille.

Set L hartiasuojamoduulilla



35 mm istuimen säätö
istuinsyvyys: 285 mm



Istuimenpidennys S 50 mm,
todellinen istuinsyvyys: 335 mm



Istuimenpidennys S 50 mm,
50 mm selkänojan pidennys
todellinen istuinsyvyys: 335 mm



istuimenpidennys S 50mm,
istuimenpidennys 50 mm ja
selkänojan pidennys 100 mm
todellinen istuinsyvyys: 350 mm